


## BUIKLIGGING -


PLATTE CRAWL BUIKLIGGING (ZONDER FREE EAR<sup>®</sup> TUBE BUIKLIGGING KUSSEN)

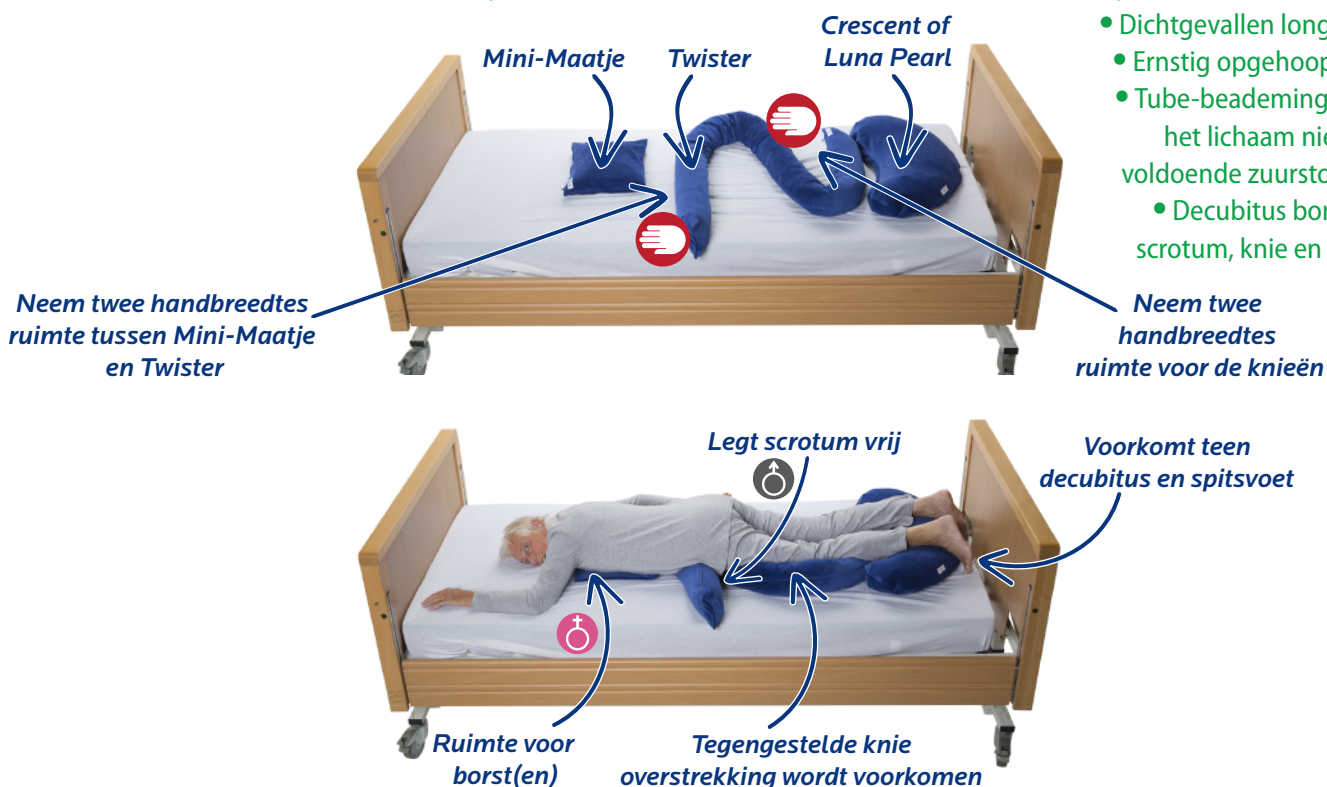

- Dichtgevallen longblaasjes
- Ernstig opgehoopt slijm
- Tube-beademing geeft het lichaam niet voldoende zuurstof (O<sub>2</sub>)
  - Decubitus borst, scrotum, knie en teen



vouwlijn

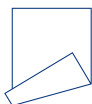

**1**

No force (aan de cliënt niet hardhandig duwen en trekken).

**2**

Neem altijd een handbreedte ruimte.

**3**

Alle ruimtes vullen waar het lichaam van de cliënt geen contact met het kussen heeft.

**4**

Tussen de cliënt en kussen strijken om overdruk van lucht weg te nemen.

**5**

De cliënt in een zijligging tegengesteld steunen