

BUIKLIGGING - TWISTER METHODIEK




- Dichtgevallen longblaasjes
- Ernstig opgehoopt slijm
- Tube-beademing geeft het lichaam niet voldoende zuurstof (O₂)
- Decubitus oor, borst, scrotum, knie en teen



Eerst cliënt zonder Twister in bed plaatsen. Twister naast cliënt leggen met rits naar cliënt gericht. Breng Twister met een rolbeweging onder cliënt zodat de rits aan de buitenzijde van de cliënt af (op jou) is gericht



vouwlijn

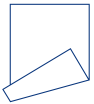

1

No force (aan de cliënt niet hardhandig duwen en trekken).

2

Neem altijd een handbreedte ruimte.

3

Alle ruimtes vullen waar het lichaam van de cliënt geen contact met het kussen heeft.

4

Tussen de cliënt en kussen strijken om overdruk van lucht weg te nemen.

5

De cliënt in een zijligging tegengesteld steunen