

RUGLIGGING - FOWLER CREËREN




- Hoge of lage spierspanning in de benen en/of heup
 - Hieldecubitus
 - Zitbeenderen decubitus
 - Spasmen
 - Oedeem



Afhankelijk van de beenlengte van patiënt kan hier Luna Pearl of Crescent worden geplaatst



vouwlijn

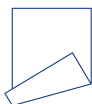

1

No force (aan de cliënt niet hardhandig duwen en trekken).

2

Neem altijd een handbreedte ruimte.

3

Alle ruimtes vullen waar het lichaam van de cliënt geen contact met het kussen heeft.

4

Tussen de cliënt en kussen strijken om overdruk van lucht weg te nemen.

5

De cliënt in een zijligging tegengesteld steunen