



RUGLIGGING HORIZONTALAAL MET HALVE MAAN METHODIEK - VLAKKE RUGLIGGING MET HALVE MAAN



- Decubitus wervelkolom, stuit en hielen
- Als het moeilijk is om cliënt op zijn of haar zij (bij 60 graden) te kunnen draaien om kussens te plaatsen

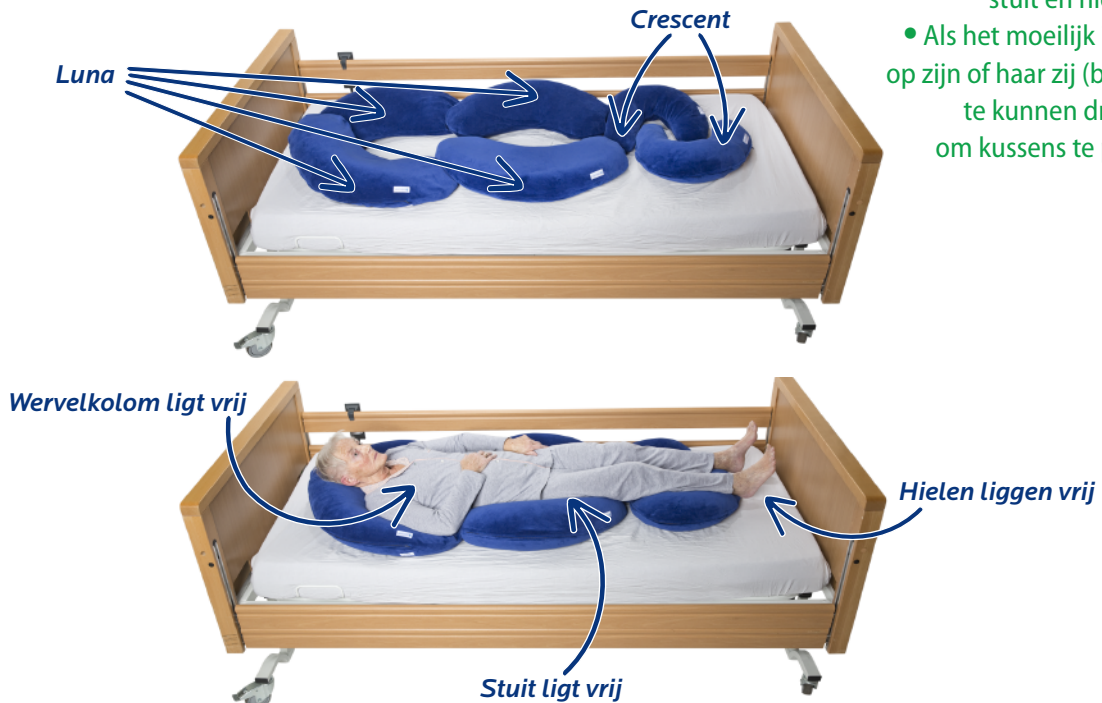

vouwlijn

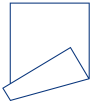

1

No force (aan de cliënt niet hardhandig duwen en trekken).

2

Neem altijd een handbreedte ruimte.

3

Alle ruimtes vullen waar het lichaam van de cliënt geen contact met het kussen heeft.

4

Tussen de cliënt en kussens strijken om overdruk van lucht weg te nemen.

5

De cliënt in een zijligging tegengesteld steunen