

## RUGLIGGING - FLEXIE ABDUCTIE INSTRUCTIE



- Indien Duorole niet voldoende ondersteuning biedt en er sprake is van niet genezende decubitus tussen de knieën, stuit of zitbeenderen bij beenspasmen.

- CVA (beroerte), gewrichtsaandoeningen, MS (Multiple sclerose) en dwarslaesie.
- Rugklachten, spierdystrofie en bekkeninstabiliteit.

*Plaats de patiënt voorzichtig en met een soepele beweging vanuit de heup op de Flexie Abductie of gebruik de passieve tillift hiervoor. Let op dat het bovenste deel (hoes) leeg is.*



*Trek de lege hoes tussen de knieën door en plaats de vulling (Luna Pearl).*



*Strijk met de hand de parels tussen de knieën.*




*Bij hygiënische verzorging van bijvoorbeeld liezen of stuit hoeft de Flexie Abductie niet te worden verwijderd. Het eenvoudig naar achteren duwen creëert ruimte voor het geven van zorg.*

*Zorg er voor dat de parels goed verdeeld zijn. Strijk met de hand de parels tussen de knieën.*

*De patiënt ligt nu comfortabel met Flexie Abductie.*



*Ook in XL formaat verkrijgbaar*

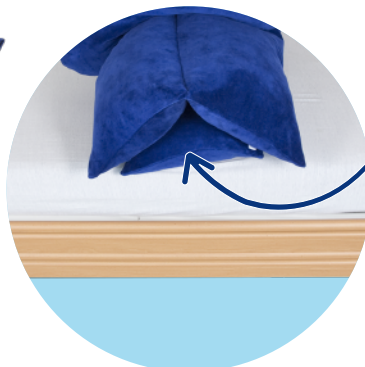

*Indien lange bovenbenen plaats een Role onder Flexie Abductie.*



*Indien lange onderbenen plaats Luna of Crescent bij de kuit.*