

DYNAMISCHE POSITIONERING ORTHESE (DPO)

De DPO van REBACARE[®] biedt drukverlaging en pijnreductie. De DPO is voor preventief en curatief gebruik en biedt comfort voor patiënten met een verhoogd risico op decubitus, spierspanning en contracturen waardoor houdingsmanagement nodig is.

Door juist te positioneren en met de hand te strijken tussen patiënt en het component kan het overtollige lucht door de filters eruit worden gestreken. Daarna sluit het filter zich automatisch. Hierdoor wordt een individuele mal gecreëerd van het lichaam.

De patiënt wordt comfortabel en volledig ondersteund zonder overdruk. Door deze handelwijze wordt pijn, decubitus, contracturen, spierspanning- en verslapping tegen gegaan.

DE DPO VAN REBACARE[®]

- De naden zijn volledig gelast en daardoor vocht- en bacteriëndicht
- Helpt kruisinfectie voorkomen
- Het ademend filter is vochtafstotend en luchtdoorlatend
- Helpt op juiste wijze positioneren en corrigeren zonder losse steunen
- Het lichaam wordt ontzien van druk
- Voldoet aan de EPUAP-Norm
- Voorzien van CE-Keurmerk
- Kan gereinigd worden met 1000 ppm Chlorine, 70% alcohol, OxyFoam, OxyWipe of detergent.
- Past binnen de WIP richtlijnen
- Er zijn 2 soorten hoezen leverbaar

DE DPO VAN REBACARE[®] IS INZETBAAR VOOR:

- IC en ziekenhuisafdelingen
- Verpleeg- en verzorgingshuizen
- Revalidatiecentra
- Particulier / thuis

Het ademend filter is vochtafstotend en luchtdoorlatend

De naden zijn volledig gelast en zijn vochtafstotend en bacteriëndicht

BIJPASSENDE HOEZEN ZIJN LEVERBAAR IN 2 VARIANTEN:

- 1** **Standaard Nicky hoezen** (80% katoen en 20% polyester en op 60 graden te wassen en kan in de droger) artikelnummer + H
- 2** **Stretch hoezen** (100% katoen, krimp-vrij en op 60 graden te wassen en kan in de droger) artikelnummer + HKS

DIVERSE SOORTEN VULLINGEN 1 2 3 4



1 GESILICONISEERDE HOLLE VEZEL EN EPS (PARELS)

Een zeer goede kwaliteit met behoud van volume en vorm. Het heeft een hoog veerkrachtig vermogen. Een combinatie van twee soorten (2 3) vullingen. Het biedt ondersteuning en kan goed druk reduceren.



2 GESILICONISEERDE HOLLE VEZEL

De vezel is veerkrachtig, hol en licht. Voelt comfortabel aan en vervormt niet. Door de veerkrachtigheid is het zeer geschikt om goed druk op te vangen en biedt het goede ondersteuning.



3 EPS (PARELS)

Deze identieke EPS parels (1 millimeter groot) zorgen ervoor dat de cliënt optimaal wordt ondersteund. Door de combinatie van luchtfilters en parels wordt er drukreductie gecreëerd.



4 FIBERS

De 5-laagse fibers zorgen voor een goed comfort en hebben een capillaire werking van vocht. Belangrijke eigenschappen van de fibers is dat het een hoge veer- en trekkracht heeft en zeer hygiënisch is.



MINIMA-MAATJE

Is een klein en multifunctioneel component voor tegengesteld steunen in zijligging en onder Duorole en flexie te plaatsen om adductie te creëren.

Omschrijving: Mini-Maatje
Maten: breed 35 cm x hoog 30 cm
Artikelnummer: 77711
BASIC UDI-DI: 87202564297775F



MAXIMA

Aangenaam om als hoog hoofdkussen te gebruiken en ideaal als voetensteun tegen spitsvoet vorming.

Omschrijving: Maxima
Maten: breed 67 cm x hoog 50 cm
Artikelnummer: 7777
BASIC UDI-DI: 87202564297775F



SUPPORT

Support zorgt voor een 30 graden zijligging en wordt samen met Mini-Maatje toegepast.

Omschrijving: Support
Maten: breed 205 cm x hoog 35 cm
Artikelnummer: 7779
BASIC UDI-DI: 87202564297775F



FORMA

Voor goede ondersteuning langs het hele lichaam. Het lichaam wordt niet gecorrigeerd, maar geaccepteerd. Ook geschikt bij buikligging.

Omschrijving: Forma
Maten: breed 200 cm x hoog 35 cm
Artikelnummer: 77716
BASIC UDI-DI: 87202564297775F



TWISTER

Legt stuit, wervelkolom en hielen vrij. Handig in gebruik op de Intensive Care. Twister wordt met minimaal draaien onder de cliënt gebracht. Bij buikligging wordt ook het scrotum vrij gelegd.

Omschrijving: Twister
Maten: breed 240 cm x hoog 16 cm
Artikelnummer: 77715
BASIC UDI-DI: 87202564297775F



COMFORT EN COMFORT XL

Comfort legt schouders en ellebogen vrij. Comfort XL legt daarnaast ook de wervelkolom en stuit vrij. Beiden zijn tegengesteld te gebruiken om onderuitzakken tegen te gaan.


Omschrijving: Comfort en Comfort XL
Maten Comfort: breed 95 cm x hoog 33 cm
Maten Comfort XL: breed 115 cm x hoog 33 cm
Artikelnummer: 77710(L) en 77710(XL)
BASIC UDI-DI: 87202564297775F



LUNA

Te gebruiken als hoofdkussen en is een handige hulp voor de 15 graden buikligging. Het legt dan het scrotum en de borst vrij.

Omschrijving: Luna
Maten: breed 70 cm x hoog 30 cm
Artikelnummer: 77717
Artikelnummer: 77723 (Doorademkussen)
BASIC UDI-DI: 87202564297775F

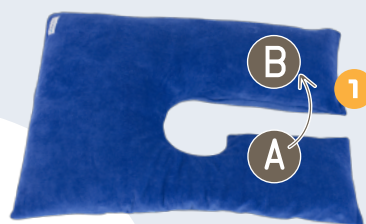

FREE EAR[®] OORKUSSEN

Legt het oor vrij. Door A op B te plaatsen (eventueel vast zetten) ligt het achterhoofd vrij.

Omschrijving: Free Ear[®] Oorkussen
Maten: breed 65 cm x hoog 50 cm
Artikelnummer: 7776
BASIC UDI-DI: 87202564297775F



LUNA PEARL

(CVA) hemiplegie armlegger voor in bed of stoel. Ook een goede steun bij de enkels of flexie in rugligging als aanvulling op Duorole, Triorole of Flexie Abductie. Handig in gebruik onder de ellebogen bij zwaar leunen ten gevolge van bijvoorbeeld benauwdheid (COPD). Geschikt voor onderarm ondersteuning bij schouderfractuur of cuff ruptuur.

Omschrijving: Luna Pearl
Maten: breed 70 cm x hoog 30 cm
Artikelnummer: 77721
BASIC UDI-DI: 87202564297775F



FREE EAR[®] TUBE BUIKLIKKING KUSSEN

Is geschikt voor buikligging. Legt het oor vrij en voorkomt decubitus. Geeft ruimte voor de Tube. Plaatst het hoofd in de juiste houding. Free Ear[®] is gepatenteerd.

Omschrijving: Free Ear[®] Tube Buikligging kussen
Maten: breed 65 cm x hoog 50 cm
Artikelnummer: 7776 T
BASIC UDI-DI: 87202564297775F



ROLE

Role is geschikt voor onder de knieholte (fowler) en langs de rug of buik geplaatst. Role is geschikt tegen het door- en terug rollen en helpt decubitus onder de ellebogen bij (zwaar) ondersteunen ten gevolge van bijvoorbeeld benauwdheid (COPD) te voorkomen.

Omschrijving: Role

Maten: breed 95 cm x hoog 35 cm

Artikelnummer: 7778

BASIC UDI-DI: 87202564297775F



DUOROLE / TRIOROLE

Is geschikt voor het vrijleggen van de hielen. Ter voorkoming van wrijfdecubitus. Samen met de fowler haalt het druk weg van de stuit en zitbeenderen. Zorgt voor een betere spiertonus, helpt bij het doorbreken van spasmen en helpt contractuurvorming te voorkomen.

Omschrijving: Duorole / Triorole

Maten (2 of 3x): breed 95 cm x hoog 35 cm

Artikelnummer (2 of 3x): 7778

BASIC UDI-DI: 87202564297775F



CRESCENT

Te gebruiken als nekondersteuning en is geschikt als voorhoofd kussen in de buikligging. Ook geschikt als ondersteuning bij de enkels in rugligging als aanvulling op Duorole, Triorole of Flexie Abductie.

Omschrijving: Crescent

Maten: breed 50 cm x hoog 25 cm

Artikelnummer: 77718

BASIC UDI-DI: 87202564297775F



FLEXIE ABDUCTIE / FLEXIE XL

Voor preventief en curatief gebruik voor patiënten met decubitus aan stuit, zitbeenderen of tussen de knieën, alsook bij te hoge spierspanning. Het bovenste deel van Flexie Abductie of Flexie XL kan worden gevuld met Luna Pearl. Is geschikt voor patiënten met contracturen (dwangstand) Adductie kan men bereiden door Minima onder de zijanten te plaatsen (zie pijltje in afbeelding)

Omschrijving: Flexie Abductie / Flexie XL

Maten: breed 95 cm x hoog 40 cm

Artikelnummer: 2 of 3 x 7778 en 1 x 77721

BASIC UDI-DI: 87202564297775F



MULTI 54 EN MULTI 64

Voor ondersteuning van het been in een beenlade van een rolstoel of in bed. Ook handig om te gebruiken voor armondersteuning. Geschikt om in te zetten bij spierverslapping of verstijving en helpt elleboog decubitus voorkomen.

Omschrijving: Multi 54 en Multi 64

Maten Multi 54: breed 54 cm x hoog 35 cm
Artikelnummer: 77725

Maten Multi 64: breed 64 cm x hoog 35 cm
Artikelnummer: 77726

BASIC UDI-DI: 87202564297775F



VERBANDSCHOEN

Voor preventief en curatief gebruik voor patiënten met of kans op hieldecubitus.

- Legt de hiel, malleolus en de achillespees volledig vrij
- Voorkomt hieldecubitus
- Veilige anti-slipzool
- Stabiliseert het been in gebruik met de Stabilo (voorkomt omklappen)
- Voldoet aan de EPUAP norm
- Past in het val preventie beleid
- Wasbaar van 60 tot maximaal 95 graden en kan in de droger

Omschrijving: Verbandschoen

Artikelnummer: 7771

Maten: breed 30 cm x hoog 25 cm

BASIC UDI-DI: 87202564297771UX



STABILO

Helpt endo- en exorotatie tegen te gaan. Stabilo kan worden gebruikt met Dekenblok en/of Maxima. Hierdoor wordt een spitsvoet voorkomen. (bv. na CVA, dwarslaesie, gips of geriatricie).

Omschrijving: Stabilo

Artikelnummer : 7773

Maten: breed 10 cm x hoog 12 cm per helft
BASIC UDI-DI: 87202564297774V5



DEKENBLOK

Dekenblok kan worden gebruikt ter vervanging van een dekenboog. Voor patiënten met een verhoogd risico op teen- en hieldecubitus door bijvoorbeeld dekendruk.

Omschrijving: Dekenblok

Artikelnummer : 7774

Maten: breed 67 cm x lengte 35 cm x dikte 12 cm
BASIC UDI-DI: 87202564297774V5



Bovenkant
van Turnability



Onderkant
van Turnability

TURNABILITY

Is ontworpen om de zorgprofessional fysiek te ontlasten en de patiënt handig van rechts naar links en links naar rechts te verplaatsen. Turnability biedt zekerheid doordat het is voorzien van sterk absorberend materiaal dat vocht snel absorbeert. Lekt niet door en beschermt het matras. Turnability is ook in XL formaat verkrijgbaar en is geschikt voor patiënten met obesitas of zwaarlijvigheid.

Omschrijving: Turnability

Artikelnummer : 7775 / XL

Maten: breed 90 cm x lang 200 cm
Basic UDI-DI 87202564297775V7



HANDY

Gebruik Handy als handschoen om gemakkelijk in het kussen een lichaamscontour (afdruk) te vormen. Handy is ook handig in gebruik bij het aan- of uittrekken van een kledingstuk of schoen. Tevens geschikt als tuber controle in een zit- of lighouding.

Omschrijving: Handy

Artikelnummer: 77722

Maten: breed 45 cm x hoog 20 cm



REBACARE[®] GEEFT 2 JAAR
PRODUCTGARANTIE OP DE DPO
REBACARE[®] GEEFT 6 MAANDEN
PRODUCTGARANTIE OP DE
VERBANDSCHOEN